



睡眠诊断 | 睡眠治疗 | 通气治疗 | 患者面罩

面罩选型指南

我应该如何选择德国万曼的面罩？

WEINMANN
medical technology

患者面罩

改善患者耐受性，更为有效治疗的关键



来自不同民族和国家的患者具有不同的脸型特征，脸型的长度，鼻子的宽度和高度等，造就了每个人脸型的差异。因此每个人对于面罩的贴合度和舒适度的需求也不尽相同。除此之外，面罩还应能承受治疗的高压力水平，并使患者自如地呼气。在使用操作方面，最好是简单安静又不会对皮肤造成任何的负担。

我们的面罩完全能够满足以上的需求，并在数十年的经验累积和反复的试验中，追求极致。德国万曼为您提供丰富多样的面罩选择，带给每个患者最适合的面罩。

这本选型指南将帮助您更好的找到最适合您的那款面罩！

万曼面罩家族



JOYCEone

第一选择，亚洲脸型



JOYCEeasy

第二选择，简单易用



JOYCEeasy X

高性价比，经济智选



JOYCE SilkGel

耐高压力水平，凝胶面罩



JOYCE

经典款式，长脸型 / 鼻型适合



JOYCE Full Face^{plus}

含下颚托



JOYCE Lite

全面罩，适合院用

尺寸

德国万曼的面罩产品几乎涵盖了所有尺寸的脸型和鼻型

XS	S	M	L	XL	LW
JOYCE SilkGel S	JOYCEeasy S	JOYCEeasy M	JOYCEeasy L	JOYCE XL	JOYCE XL

全尺寸自适应：JOYCEone

型号

面罩垫的特征比较

	JOYCEone	JOYCEeasy	JOYCE SilkGel	JOYCE
鼻罩	 JOYCEone 一个尺寸，整体更宽，鼻梁部分更加柔软灵活	 JOYCEeasy 相比 JOYCE 在鼻梁部分更宽，长度更长	 JOYCE SilkGel 在鼻梁部分较窄，凝胶材质	 JOYCE 在鼻梁部分较窄，尺寸从 S-XL
全面罩		 JOYCEeasy Full Face	 JOYCE SilkGel Full Face	 JOYCE Full Face

面罩

JOYCEone

理想的面罩，从 JOYCEone 开始



JOYCEone 自适应鼻罩面罩，仅一个尺寸，能够适合约 85% 的患者。面罩垫轻盈舒适，在鼻梁的部分柔软灵巧，可以根据鼻子的大小自动调整。

在佩戴面罩时，可以通过头带搭扣来松开上头带，面罩前额支撑能够自动调整额垫到前额的适合位置。

JOYCEone 的面罩垫加强了在鼻梁部分的宽度，特别适合亚洲人脸型。



小贴士：如果已经佩戴上面罩，并已经打开呼吸机的开始进气，可以将面罩轻轻的从脸上稍稍拉出，然后再放回。这样能够更好的适应面罩佩戴，并且使空气进入并充盈面罩垫。

鼻罩

JOYCEeasy

JOYCEeasy 同样佩戴舒适，操作简便。提供 S,M,L 三种尺寸选择。可以通过试戴选择最适合您的尺寸。

头带的松紧同样可以通过头带搭扣来调节。前额支撑有 6 档可以调节。




鼻罩和全面罩

JOYCE SilkGel

如果患者更喜欢凝胶面罩，可以选择 JOYCE SilkGel。同样拥有 S,M,L 三个尺寸选择。

JOYCE SilkGel 相比硅胶面罩有更好的气密性，能够承受更高的压力水平。

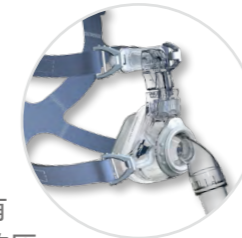

鼻罩和全面罩

JOYCE

JOYCE 可以提供 XL 的尺寸，适合脸型较长或者鼻部较长的患者。

鼻罩和全面罩









JOYCE Full Face^{plus}

带下颚托的面罩，尺寸从 S 号 -XL 号，适合有络腮胡或者下颚肌肉无力患者。

全面罩



技术参数

	鼻罩						全面罩						
													
产品	JOYCEone	JOYCEeasy	JOYCEeasy X	JOYCE SilkGel	JOYCE		JOYCEeasy	JOYCEeasy X	JOYCE SilkGel	JOYCE			JOYCE Lite
	自适应鼻罩	轻盈鼻罩	智选鼻罩	丝质凝胶鼻罩	经典鼻罩		轻盈全面罩	智选全面罩	丝质凝胶全面罩	经典全面罩			院用全面罩
治疗压力范围	4 - 30 hPa	4 - 30 hPa	4 - 30 hPa	4 - 40 hPa	4 - 30 hPa	4 - 40 hPa	4 - 30 hPa	4 - 30 hPa	4 - 40 hPa	4 - 30 hPa	4 - 30 hPa plus (带下颚托)	4 - 40 hPa	4 - 30 hPa
尺寸	全尺寸, 自适应	S/M/L	S/M/L	S/M/L	S/M/L/XL	S/M/L/XL	S/M/L	S/M/L	S/M/L	S/M/L/XL	S/M/L/XL	S/M/L/XL	S/M/L
材质	硅胶材质	硅胶材质	硅胶材质	凝胶材质	硅胶材质	硅胶材质	硅胶材质	硅胶材质	凝胶材质	硅胶材质	硅胶材质	硅胶材质	硅胶材质
WEINMANN SilkTec 丝质表面处理工艺	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
防窒息阀	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
360 度球形万向节	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
可调节额垫	✓ 自动	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
氧气接口 / 压力监测管	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
快速脱卸拉绳	-	-	-	-	-	-	可选配	-	可选配	可选配	可选配	可选配	可选配
不通气万向转接管	-	-	-	-	可选配	可选配	-	-	可选配	-	-	可选配	可选配
可外接呼气阀	-	-	-	-	可选配	可选配	-	-	可选配	-	-	-	可选配

德国万曼医疗成立于 1874 年，总部坐落于德国经济
贸易中心——汉堡，是一家拥有 140 余年历史的德国
知名企业，制造了欧洲第一台无创通气设备。

140 年来，德国万曼医疗致力于在睡眠诊断、睡眠治疗、
通气治疗、患者面罩等重要医疗领域为医生与患者提
供最高品质的医疗设备与系统解决方案。

目前德国万曼医疗的产品已行销全球超过 70 个国
家和地区，我们在当地拥有完善的咨询、物流和售后服
务网络，随时准备为客户提供任何帮助。

德国万曼医疗器械有限公司上海代表处

上海市长宁区延安西路 1538 号怡德大厦 B 座 1 楼

T: 021 3226 2698 E: info@weinmann.cn weinmann.cn

客户热线：4000-361-520



德国制造
百年历史



medical technology
made in germany

partner for life

A Company in the Löwenstein Group

WEINMANN
medical technology